


Contenido Ref. 149960

- 1 bolsa con auto cierre para la conservación de los dispositivos (A)
- 1 bolsa con cierre adhesivo para la devolución de los dispositivos (B)
- 3 tubos transparentes con líquido en su interior
- 3 tubos con cucharilla y extremo cónico


Instrucciones de uso:

Recoger muestras de 3 días alternos, siguiendo el siguiente procedimiento para cada muestra:


- 1 Sacar 1 tubo con líquido y 1 tubo con cucharilla y extremo cónico de la bolsa.

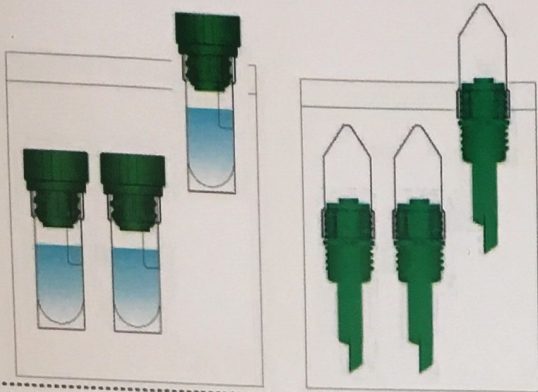

- 2 Colocar un recipiente o papel (periódico, revista) limpio en el wáter para recoger las heces

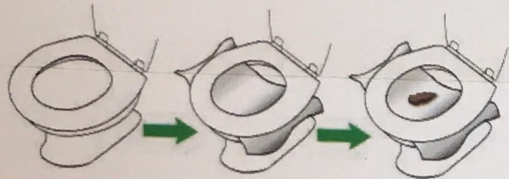

- 3 Recoger una muestra de heces del tamaño de una avellana grande con la cucharilla que está unida al tubo con extremo cónico.

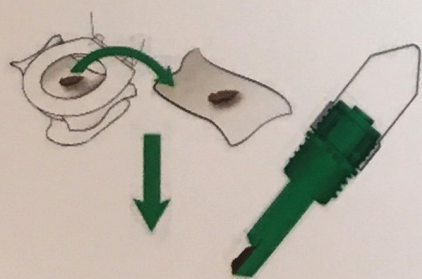


¡Importante!

El contenido líquido de los recipientes es tóxico (solución SAF™).




NO INGERIR.

- 4 Abrir el tubo desenroscando el tapón verde.

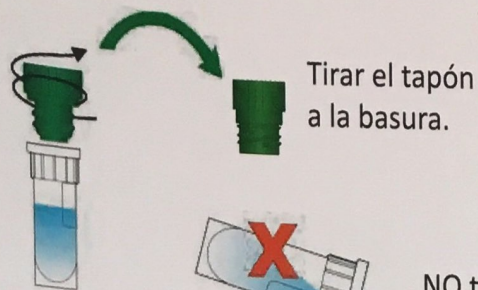


Tirar el tapón a la basura.

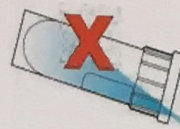


NO tirar el líquido.

- 5 Introducir la cuchara con muestra en el tubo con líquido y cerrar enroscando, comprobando que queda bien cerrado y no pierde líquido.

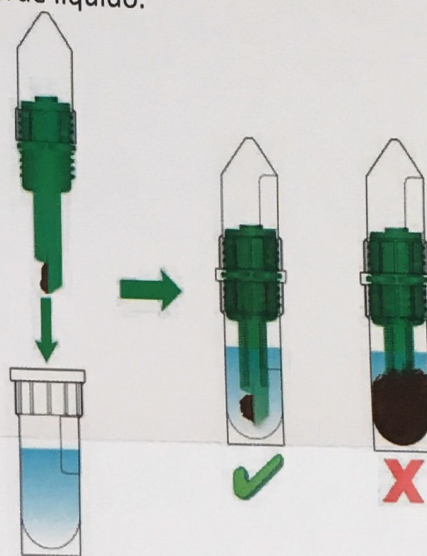

- 6 Guardar los tubo en la bolsa de plástico, a temperatura ambiente, hasta que se entreguen al centro de salud.

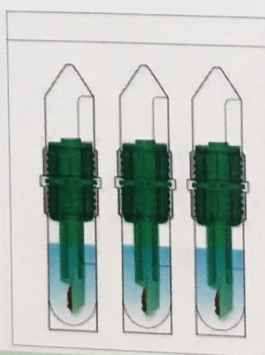

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, beber gran cantidad de leche o agua y llamar al Servicio de Información Toxicológica: 91 562 04 20. Si el contenido líquido entra en contacto con piel, ojos y mucosas, lavar con abundante agua y consultar inmediatamente con un servicio médico.

APACOR

Guía para la Recogida de Muestras de Heces
Midi Parasep® SF

APACOR

UNIT 5 SAPPHIRE CENTRE
FISHPONDS ROAD, WOKINGHAM
BERKSHIRE, RG41 2QL, ENGLAND
TEL: +44 (0)118 979 5566
FAX: +44 (0)118 979 5186



IVD

APA138 - V4.0 02/2018